

ÎNCĂLZITOR CU INDUCȚIE SJK

Manual de utilizare

Mediu de utilizare

- A se utiliza în interior
- Umiditate: 50% - 80%
- Temperatură: între 5°C - 40°C
- Toleranță: $\pm 10\%$ din tensiunea desemnată
- Grad de poluare: 2

Specificații

Clasificare	Sursă de tensiune	Voltaj	Siguranță	Temperatură	Dimensiuni (mm)	Greutate (kg)
JT - 29B - A	AC220V - 240V 50/60 Hz	100W	2A	-	270 × 92 × 95	0.55
JT - 29B - B	AC110V 50/60 Hz	100W	2A	-	270 × 92 × 95	0.55

Descrierea produsului

Este un instrument care încălzește instant cuțitul de ceară într-o manieră sigură și convenabilă față de o încălzire convențională a cuțitului de ceară folosit la arzătorul Bunsen, lămpile cu alcool, arzătorul pe gaz, etc.

1. Încălzește instant cuțitul pentru ceară
2. Sigur împotriva arsurilor și a focului
3. Economisește energie datorită unui senzor electronic avansat
4. Design ergonomic și comod
5. Ușor de utilizat, iar capacul se poate înlocui

În cazul în care instrumentul este ținut prea mult este afișată o eroare pentru a proteja atât produsul cât și utilizatorul.

Mod de utilizare

1. Conectați cablul și apăsați butonul de pornire.
2. Poziționați cuțitul în centrul senzorului.
3. Dacă cuțitul de ceară se încălzește înseamnă că încălzitorul funcționează normal și poate fi utilizat fără probleme.

Precauții

1. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede. Dispozitivul are în interior circuite electrice de mare precizie și orice supra-alimentare poate cauza o defecțiune.
2. Pentru o performanță optimă încercați să evitați contactul dispozitivului cu produse care degajă radiații în infraroșu.
3. Aveți grijă să nu puneți cuțitul de ceară cu reziduuri pe el lângă senzorul optic (se poate deteriora sensibilitatea acestuia).
4. Nu folosiți cablul de alimentare deteriorat și nu îl introduceți într-o priză slăbită.
5. Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și aveți grijă să nu fie tasat de alte obiecte. **Există pericolul de electrocutare sau incendiu*
6. Ștecherul trebuie să aibă conexiune la un terminal cu împământare.
7. **Nu blocați ventilatorul situat în partea de jos a produsului.** **Există pericolul de electrocutare sau incendiu*
8. Deconectați cablul de alimentare când fulgeră sau tună și când dispozitivul nu este folosit mai mult timp.
9. Nu scoateți cablul de alimentare și nu atingeți ștecherul cu mâinile umede. **Există riscul de electrocutare sau incendiu*
10. Nu așezați dispozitivul în locuri cu umezeală, praf sau picături de apă. **Există pericolul de electrocutare sau incendiu*
11. A nu se instala în apropierea aparatelor electrice de încălzire. **Există pericolul de electrocutare sau incendiu*
12. Înainte de a-l curăța, deconectați cablul de alimentare și nu pulverizați direct apă sau substanțe chimice. **Există pericolul de electrocutare sau incendiu*
13. Curățați bine de praf și apă zona de contact cu alimentarea. **Există riscul de electrocutare sau incendiu*
14. În cazul unor sunete/mirosuri ciudate sau dacă vedeți că iese fum din aparat deconectați imediat cablul de alimentare.